

Zahnaufhellung mit Konzept

Strahlend weiße Zähne für ein
umwerfendes Lächeln.



bisico®

Zahnaufhellung mit Konzept

Willkommen in der Welt der Zahnaufhellung - wo strahlendes Lächeln auf innovative Lösungen trifft! Diese Informationsbrochure bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über unsere erstklassigen Zahnaufhellungsprodukte. Unter dem Motto „**Zahnaufhellung mit Konzept**“ präsentieren wir Ihnen eine Vielzahl von Methoden und Produkten, die sowohl für Ihre Praxis als auch für Ihre Patienten maßgeschneiderte Lösungen bieten.

Dank der unterschiedlichen Optionen ermöglichen wir Ihnen, auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patienten einzugehen. Für eine schnelle und effektive Zahnaufhellung direkt in der Praxis empfehlen wir unser In-Office Bleaching mit **NATURAL+**. Für Patienten, die die Vorteile einer sanften Zahnaufhellung in den eigenen vier Wänden erleben möchten, steht das **GLO Science** Homebleaching Set zur Verfügung. Dieses innovative System kann sowohl eigenständig als auch nach einem In-Office Bleaching angewendet werden, um den maximalen Weißeffekt zu erzielen.

Darüber hinaus bieten wir das **Natural+ Home Set** an, welches Ihren Patienten die Möglichkeit gibt, den Aufhellungseffekt nach dem In-Office Bleaching über einen Zeitraum von etwa 12 Monaten einmal im Monat aufrechtzuerhalten. Mit diesen verschiedenen Varianten geben wir Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihren Patienten ein strahlendes Lächeln zu schenken und deren Zufriedenheit nachhaltig zu steigern.

Entdecken Sie mit uns die Möglichkeiten der Zahnaufhellung und bieten Sie Ihren Patienten individuelle Lösungen für ein strahlendes Lächeln!

IN-OFFICE-BLEACHING

4



11

REFRESH HOME-KIT




HOME-BLEACHING

14



Einzigartiges Design – Einzigartige Wirkung

NATURAL+ Professional ist ein innovatives, etabliertes System der Zahnaufhellung für die Behandlung aller Typen intrinsischer und extrinsischer Flecken und Verfärbungen. Das NATURAL+ Professional Gel basiert auf stabilisiertem 33%-igem H_2O_2 . Bei den marktüblichen Zahnaufhellungssystemen, die auf Wasserstoffperoxid basieren, ist der Aufspaltungsprozess des H_2O_2 abhängig von Temperatur, Stabilisatoren, Übergangsmetallen sowie Katalysatoren. Das patentierte **umweltfreundliche Natural+ Wasserstoffperoxid Gel** hat eine völlig andere Wirkungsweise.

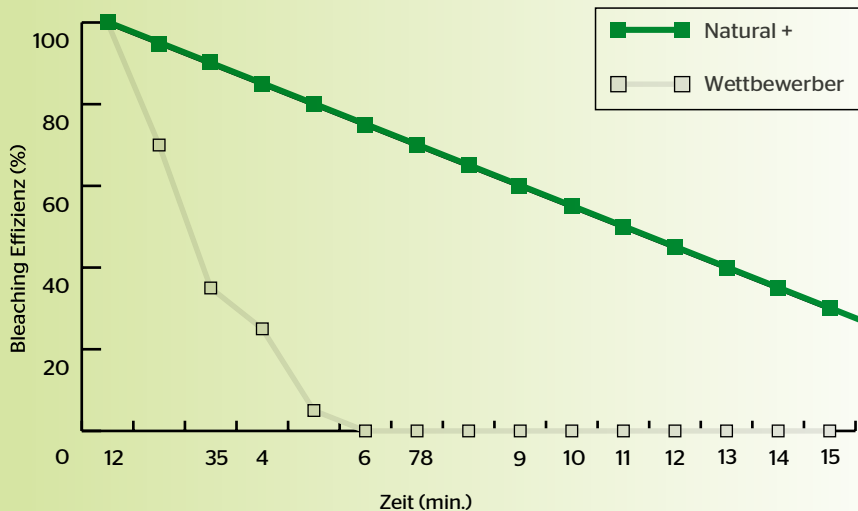

Was macht NATURAL+ so einzigartig?

Das NATURAL+ Professional Gel basiert auf stabilisiertem 33%-igem H_2O_2 . Der Prozess der Sauerstofffreisetzung ist während des Bleachingvorgangs progressiv und nicht volatil. Diese spezifische Eigenschaft macht es möglich, dass die Wirksamkeit des Wirkstoffes über einen Zeitraum von mind. 45 Minuten erhalten bleibt und somit ein erneutes Auftragen des Gels nicht erforderlich ist.

Der Arbeitsaufwand wird deutlich minimiert, da der Bleachingvorgang in einem Arbeitsschritt durchgeführt wird. Ein erneutes Auf- und Abtragen des Bleachinggels entfällt.

Die kontinuierliche, langsame Freisetzung der radikalen Sauerstoffionen ermöglicht ein tiefes Eindringen der Sauerstoffionen in das Dentin.

Das NATURAL+ Bleachinggel ist mit **Kalzium, Kaliumnitrat** und **Natriumfluorid** angereichert. Die stabilisierte Formel ermöglicht die Zugabe dieser Mineralien in einer hohen Konzentration ohne das Wasserstoffperoxid aufzulösen. Einer Demineralisierung der Zähne wird so entgegengewirkt.

Das NATURAL+ Bleachinggel ist **frei von Schwermetallen** und **100% ökologisch**. Schwermetalle verbinden sich mit den Mineralien auf der Zahnoberfläche und verursachen einen Wasserverlust durch Diffusion, was zur Austrocknung der Zähne führt. Eine optimale Hydratation der Zähne wird so während des gesamten Bleachingprozesses gewährleistet.



NATURAL+ in der Praxis
Anwendungsberichte von Zahnärzten für Zahnärzte



Sechs Komponenten – Ein perfektes Ergebnis



Das NATURAL+ Professional Set beinhaltet alle Komponenten, die für eine erfolgreiche und reibungslose Behandlung nötig sind:

PowerPrep+

Das PowerPrep+ Gel ist ein Vorbereitungs- und Reinigungsgel zur Entfernung des Biofilms. Das PowerPrep+ Gel konditioniert den Zahnschmelz für den Aufhellungsprozess.

Gingiva Protector

Der Gingiva Protector ist ein Schutzgel für die Gingiva zur Minimierung von Sensibilitäten am Zahnfleisch. Der Gingivaschutz deckt Schleimhäute, Putzdefekte und freiliegende Zahnhälse ab. Durch die hohe Viskosität lässt sich der Gingiva Protector hervorragend nacharbeiten, ohne zu verlaufen.

NATURAL+ Aktivator

Das Aktivierungsgel wird mit dem Aufhellungsgel vermischt. Dieses ist angereichert mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid.

NATURAL+ Aufhellungsgel mit 33% H₂O₂

Das NATURAL+ Aufhellungsgel wird einmalig auf die Zähne aufgetragen und wirkt für 30-45 Minuten ein. Der pH-Wert bleibt neutral und verringert eine übermäßige Dehydratation der Zähne.

Polierpaste

Die Polierpaste ist eine spezielle Prophylaxepaste zur Fluoridierung der Zähne nach dem Bleaching. Die Polierpaste ist mit amorphem Calciumphosphat und mit Mineralien aus dem Toten Meer (Natriumfluorid 3,6%) angereichert.

Pflegebalsam

Pflegender und schmerzlindernder Balsam bei Empfindlichkeiten am Zahnfleisch.



PH neutraler Bleachingprozess mit natürlichen Zutaten

Dank der speziellen patentierten Formel erfolgt die Zahnaufhellung ökologisch, nicht toxisch und nahezu schmerzfrei. Durch die Vermischung des Aktivators (pH Wert von 14) und des Bleachinggels (pH Wert von 3) erfolgt der Aufhellungsprozess pH neutral.

Das Natural+ Bleachinggel ist mit Kalzium, Kaliumnitrat und Natriumfluorid angereichert, wodurch eine optimale Mineralisierung der Zähne während des gesamten Bleachingprozesses gewährleistet ist.

Kalzium

- + Schützt vor Demineralisierung
- + Puffer für den Säuregehalt
- + Neutralisiert

Kaliumnitrat

- + Beruhigt die Zahnnerven
- + Puffer für den Säuregehalt

Natriumfluorid

- + Stärkt den Zahnschmelz
- + Hat kariostatische Wirkung:
Die Säurelöslichkeit der Zahnhartsubstanz wird vermindert und die Remineralisation gefördert.

Bis zu 8 Farbstufen weißere Zähne in 30 Minuten



Komfortables Design- Sichere Anwendung



Die NATURAL+ Lampe ist eine revolutionäre Zahnaufhellungslampe mit Hochleistungs-LED-Technologie, die sich durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Lichtspektren, aus rotem und blauem Licht, auszeichnet. Die Wellenlänge, Bestrahlungsstärke und Behandlungsdauer sind auf den Einsatz mit dem Natural+ Zahnaufhellungsgel optimal abgestimmt.

Die LED-Lampe wird mit optimalem Abstand zu den Zähnen, an eine Vorrichtung der Kopfhörer befestigt. Die Kopfhörer zeichnen sich durch ein ergonomisches Design und einen hohen Tragekomfort aus. Via Bluetooth lassen sich externe Quellen (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) mit den Lautsprechern des Kopfhörers koppeln, sodass während der Behandlung entspannt Musik gehört werden kann.

Die Steuerungseinheit überzeugt durch eine intuitive Bedienung. 4 Programme mit unterschiedlichen Intensitätsstufen stehen dem Anwender zur Verfügung. Die Auswahl der Stufe ist abhängig vom Zustand der Zähne und der Empfindlichkeit des Patienten. Zudem kann über ein Programm der Gingivaschutz ausgehärtet werden. Die Steuerungseinheit kann auch über die beiliegende Fernbedienung bedient werden.

In der Natural+ LED Lampe sind sowohl blaue als auch rote LEDs integriert. Die maximale Temperatur beträgt 34 Grad. Die blauen LED's mit einer Wellenlänge von 470 Nanometer wirken als Katalysator für das Natural+ Bleachinggel und verbessern die Wirksamkeit auf der Oberfläche bei tiefergehenden Verfärbungen. Die Intensität des blauen Lichts ist außerdem stark genug, um den Gingiva-Protector auszuhärten. Die roten LEDs haben eine Wellenlänge von 660 Nanometer. Dies sorgt dafür, dass das Zahnfleisch geschützt und Zahnfleischsensibilitäten reduziert werden. Zusätzlich ist bekannt, dass das Licht mit dieser Wellenlänge, die Aufnahme von Mineralien wie Kalzium und Fluoriden in das Enamel fördert.

Intuitive
Steuerungseinheit mit
4 Aufhellungsprogrammen




Hochleistung LED's mit
zwei Lichtspektren

Behandlungsvideo Schritt-für-Schritt Anleitung



Patientengewinnung

Mit standardisierten Werbemedien wie dem **Natural+** Praxisaufsteller, Roll-Up, Plakat und Patientenflyern gibt es zahlreiche Möglichkeiten Patienten auf **Natural+** aufmerksam zu machen und Ihnen Informationen über das Produkt bereitzustellen.

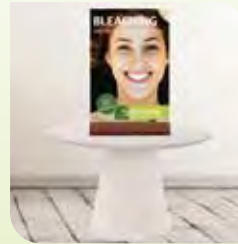

Auf Wunsch können auch individualisierte, auf Ihre Praxis maßgeschneiderte, Werbemedien für Ihr Zahnaufhellungskonzept mit **Natural+** bereitgestellt werden. Auch bieten wir Ihnen die Möglichkeiten von Veranstaltungen wie z. B. einem **"Bleaching Day"** oder anderen individuellen Projekten. Impressionen aus unseren Kundenprojekten finden Sie auf unserem **Instagram-Profil @biscobleaching**.



Erfahrungsberichte und Interviews von Zahnärzten und Kieferorthopäden über das innovative System **Natural+™ Professional** zum nachlesen.



„Natural+ bestach als erstes sofort durch seine Mitarbeiterin im Außendienst. Daneben bot dann auch noch das Bleachingssystem selbst zahlreiche Vorteile, weswegen wir uns am Ende dafür entschieden haben. Bequeme Kopfhörer, die die Lampe in Position halten. Heißt also, dass leichte Bewegungen des Patienten kein Problem sind und die Lampe leicht verstaubar und transportabel ist (wir haben z.B. zwei Praxen und kommen bisher mit einer Lampe hin). Die Materialien lassen sich leicht applizieren und haben ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.“

Zahnarztpraxis Kmiotek, Wilhelmine Kmiotek

„Das ästhetische Erscheinungsbild wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer Gesellschaft. Ein strahlend weißes Lächeln ist ein wichtiges Merkmal dieses Erscheinungsbildes. Die Nachfrage nach einer Zahnaufhellung ist daher im Moment so hoch wie nie.“

Zahnzentrum Potsdam,
Volker Siemund und Mustapha A. Hashemi

„Wir können nur jede Zahnarztpraxis beglückwünschen, die mit den Produkten von Bisico arbeitet! Wir sind absolut begeistert und super dankbar für die Zusammenarbeit. Wir lieben das System und unsere Bleaching Zahlen sind deutlich (!) nach oben gegangen! Die Patienten lieben's halt auch.“

Dental East, Zahnarzt Marc Vollert



„Das NATURAL+ Zahnaufhellungssystem hat zwei Alleinstellungsmerkmale, wodurch es sich grundlegend von allen am Markt erhältlichen Zahnaufhellungssystemen unterscheidet: Das NATURAL+ Zahnaufhellungsgel basiert auf stabilisiertem 33-prozentigem H_2O_2 . Der Prozess der Sauerstofffreisetzung ist während des Bleachingvorgangs progressiv und nicht volatil. Diese spezifische Eigenschaft macht es möglich, dass die Wirksamkeit des Wirkstoffes über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten erhalten bleibt. Ein wiederholendes Auf- und Abtragen des Zahnaufhellungsgels ist nicht erforderlich.“

SOLO Zahnarztpraxis, Hannah Petersen

„Die Rückmeldungen unsere Patienten sind äußerst ermutigend, da sie nach der Behandlung sehr glücklich und zufrieden mit den Ergebnissen sind. Sie schätzen die sichtbare Verbesserung ihres Lächelns und sind begeistert von der Aufhellung ihrer Zähne. Unsere Patienten freuen sich über das erzielte Ergebnis und geben uns regelmäßig positives Feedback darüber, wie ihr Selbstbewusstsein gestärkt wurde.“

MVZ CurvaDent GmbH, Heidi Otto

Optimierte Aufhellungsergebnisse nach einer In-Office Behandlung

Das NATURAL+ HOME Kit ist die perfekte Ergänzung zum NATURAL+ Professional In-Office-Bleaching.

Mit dem NATURAL+ Home Kit können Ihre Patienten das strahlend weiße Lächeln nach einem In-Office-Bleaching bis zu einem Jahr von Zuhause aufrecht erhalten. Das Bleachingergebnis des NATURAL+ In-Office-Bleaching wird mit dem NATURAL+ HOME Kit einmal im Monat aufgefrischt.

Das Home-Kit enthält eine Zahnbürste, eine Power-Prep Zahnpasta, 6%-iges NATURAL+ Wasserstoffperoxidgel, ein Mundstück mit LED-Licht sowie Adapter für Smartphones. Das Mundstück ist in Universalgröße gefertigt und umfasst die oberen und unteren Zähne gleichzeitig. Angeschlossen wird das Mundstück an das Smartphone des Patienten. Die Behandlungsdauer wird dank des hoch intensiven LED-Lichts verkürzt. Im Mundstück ist ein Timer von 60 Minuten eingebaut. Dieser wird automatisch, durch drücken der Starttaste auf dem Kabel, aktiviert. Das Gel sollte 60 - max. 90 Minuten auf den Zähnen bleiben. Wiederholt wird der Auffrischungsvorgang alle 4 Wochen. Natural+ Home ist nur in Verbindung mit Natural+ Professional erhältlich.



Easy Light

Mobile Dental Photography

Das Easy Light verbessert die Qualität von Smartphone Aufnahmen und kann hervorragend für die Dokumentation von Bleaching-Ergebnissen verwendet werden.

Die Bedienung ist sehr einfach, es werden keine spezielle App, kein Kalibrierungsprozess und keine besondere Ausbildung benötigt.

Der Universaladapter ist passend für jedes Smartphone.



**JETZT KOSTENLOSEN DEMO-TERMIN
IN IHRER PRAXIS VEREINBAREN**

0521-80 16 800



GLO Science PRO Home

Prämiertes Zahnaufhellungsset für Zuhause



PROFESSIONELLE ZAHNAUFHELLUNG

GLO Science Pro Home ist ein hoch-modernes Bleachingset für die Zahnaufhellung für Zuhause.

Mit GLO Science Pro Home erhält der Patient ein professionelles Zahnbleaching im innovativen Design.

Ob im Anschluss an ein In-Office Bleaching, einer Prophylaxebehandlung oder nur als Anwendung für zu Hause, GLO Science Pro Home verspricht eine Zahnaufhellung von bis zu 5 Farbstufen.

Alles was der Patient für ein erfolgreiches Bleaching benötigt, wird in einem eleganten Beautycase geliefert.

Eine zeitaufwendige und teure Anfertigung von individuellen Zahnschienen gehört der Vergangenheit an.

Im GLO Mundstück ist eine Lampe integriert, die LED-Licht und aktivierende Wärme kombiniert und dadurch eine intensive, aber zahnschonende Einwirkung des Bleachinggels ermöglicht.

Preisgekrönte Technologie

Das GLO Science Pro Home Bleaching Gerät wurde vom Edison Award in der Kategorie Exzellenz für Innovation und Design ausgezeichnet.

Video



GLO Science Pro Home überzeugt durch das einzigartige Design und seiner innovativen Technologie. In einem stylischen Beauty-case erhält der Patient alles, was für eine erfolgreiche Zahnaufhellung benötigt wird: GLO Regler, Universalmundstück, 10 Ampullen mit 6% H_2O_2 Bleachinggel für mind. 40 Anwendungen, Lippenbalsam und ein USB-Ladekabel.

Mit seiner einfachen Bedienbarkeit und Handhabung, sowie seiner praktischen Größe sammelt GLO Science Pro Home weitere Pluspunkte bei den Anwendern. Jederzeit und überall kann GLO Science Pro Home angewendet werden, ohne den Benutzer einzuschränken.

GLO SCIENCE PRO^{professional}

THE SCIENCE OF WHITENING

Die natürliche Zahnfarbe


Jeder Mensch hat eine genetisch bedingte natürliche Zahnfarbe. Bei den wenigsten Personen ist diese strahlend weiß, oft erscheinen die Zähne von Natur aus etwas dunkler oder haben einen Gelbstich. Das liegt daran, dass das gelbliche Dentin, durch den fast transparenten Zahnschmelz zu erkennen ist. Je dünner der Zahnschmelz, umso deutlicher ist das Dentin zu sehen und desto gelber erscheinen die Zähne. Dies gilt jedoch nicht als Verfärbung, sondern als natürliche Zahnfarbe.

Was versteht man unter Zahnverfärbung?


Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Zahnverfärbungen:

1. Äußere Zahnverfärbungen (extrinsisch)
2. Innere Zahnverfärbungen (intrinsisch)

Diese beiden Arten der Verfärbung entstehen auf unterschiedliche Art. Während die extrinsischen Verfärbungen durch in den Zahnschmelz vordringende Ablagerungen entstehen, bilden sich die intrinsischen Verfärbungen aus der Zahnschmelz heraus.

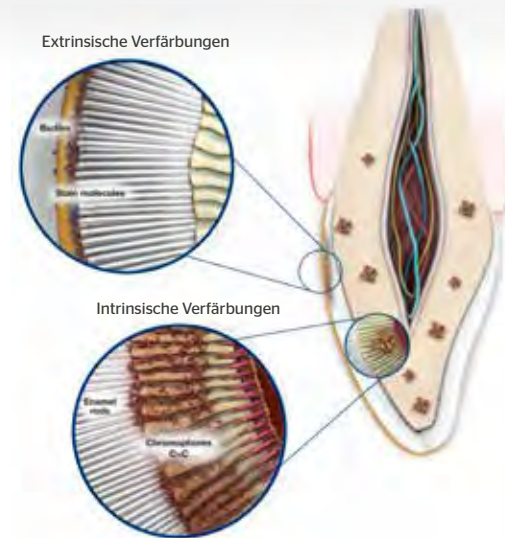

Einflussfaktoren Zahnaufhellung

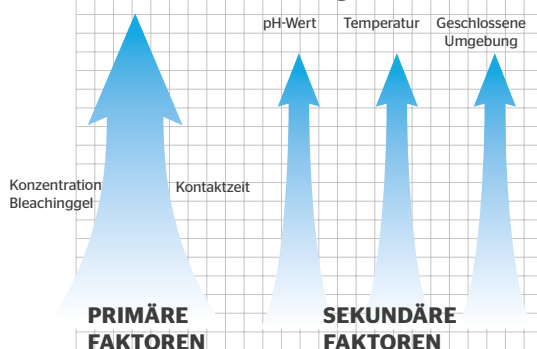

Zahnaufhellung mit Wasserstoffperoxid (H_2O_2)

Für die Verfärbung verantwortlich sind Farbstoffe - sog. Chromophore. Diese besitzen zahlreiche Doppelbindungen, welche durch Lichtabsorption für die Farbgebung des Zahnes verantwortlich sind. Das vergleichsweise niedrige Molekulargewicht des Wasserstoffperoxids ermöglicht es diesem durch Schmelz und Dentin zu penetrieren und freie Sauerstoffradikale unter der Zahnoberfläche wirksam zu produzieren. Diese brechen die Doppelbindungen der Chromophore und es entstehen ungesättigte, lineare Kohlenwasserstoffverbindungen, die das menschliche Auge als helles Farbpigment wahrnimmt.


Einflussfaktoren auf das Zahnaufhellungsergebnis

Die primären Faktoren, die die Wirksamkeit des Bleichens beeinflussen, sind:


- Die Konzentration des H_2O_2 -Gels
- Kontaktzeit des Gels mit den Zähnen
- Zu den sekundären Faktoren, die die Wirksamkeit der aufhellenden Sauerstoffmoleküle erhöhen, gehören:
 - pH-Wert
 - Temperatur
- Geschlossene Umgebung - Sauerstoffmoleküle können nicht in die Atmosphäre entweichen. Je besser die Isolierung, desto effektiver ist die Aufhellung

Ursachen für Empfindlichkeiten bei der Zahnaufhellung

- Eine zu hohe Temperatur (über 53 °C) führt zu einem Anstieg der intrapulpalen Temperatur, was Empfindlichkeiten und eine irreversible Pulpitis (Entzündung des Zahnmarks, der Blutgefäße, Nerven und lebende Zellen enthält) verursachen kann.
- Die langsame Zersetzungsgeschwindigkeit von Carbamidperoxid-Gelen erfordert einlängere Einwirkungszeit des Gels auf den Zähnen, wodurch Empfindlichkeiten entstehen können.
- Bei der klassischen Homebleaching-Methode mit Schiene, wirkt das Bleachinggel mindestens über 6 Stunden ein. Durch die lange Einwirkungszeit können Empfindlichkeiten entstehen.

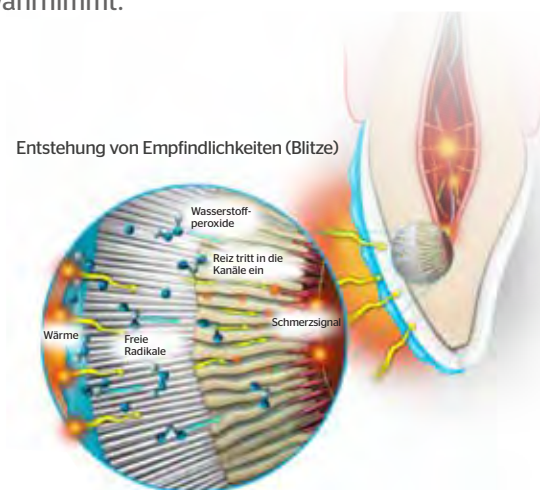

Geschlossenes System
Universal Mundstück

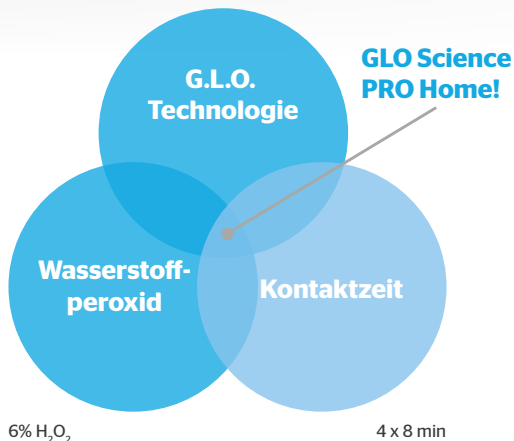


Revolution in der Zahnaufhellung

GLO Science Pro Home vereint die primären und sekundären Einflussfaktoren der Zahnaufhellung bei gleichzeitiger Reduktion der Empfindlichkeiten. In Verbindung mit der G.L.O. Technologie hat GLO Science es geschafft ein revolutionäres System der Zahnaufhellung zu entwickeln: maximale Wirksamkeit des Bleachinggels für optimale Zahnaufhellungsergebnisse ohne Sensibilitäten.

Die G.L.O Technologie

Die bahnbrechende patentierte Innovation von GLO ist ein Mundstück in Universalgröße, das Licht und Wärme in einem geschlossenen System kombiniert. Die kontrollierte Erwärmung beschleunigt die Reaktion des hochreaktiven 6%-igen H_2O_2 und das geschlossene System verhindert, dass die aufhellenden Sauerstoffmoleküle von der Zahnoberfläche entweichen. Dies führt zu einer kürzeren Einwirkzeit des H_2O_2 -Gels und damit zu einer geringeren Empfindlichkeit. Die Wärme wird auf die optimale Temperatur (von max. 42°C) reguliert, wodurch Überreaktionen der Pulpa verhindert werden. Die Effektivität des Bleachingprozesses ist 5-mal höher als bei Anwendungen ohne Lampe.

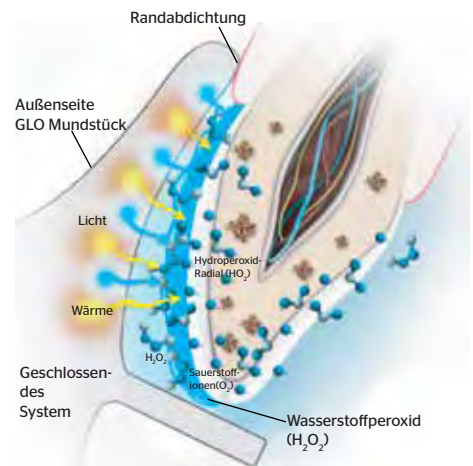

GLO G-Vial Ampullen mit 6%- H_2O_2

Das 6%- H_2O_2 Bleachinggel befindet sich in den wiederverschließbaren G-Vial Ampullen. Mittels innovativerer Pinselspitze lässt sich das standfeste Bleachinggel ganz einfach auf die Zähne applizieren ohne zu verlaufen oder von den Zähnen zu tropfen.

Das Gel ist in den G-Vial Ampullen luftdicht verschlossen, sodass das Gel auch nach dem Öffnen immer frisch bleibt - ganz ohne Kühlung. Die G-Vials Ampullen sind vegan, recycelbar, gluten- und latexfrei. Eine Ampulle reicht für mind. 4 Anwendungen.



IN 18 MINUTEN ZU WEISSEN ZÄHNEN

Das Bleachinggel befindet sich in den wiederverschließbaren G-Vial Ampullen. Mittels innovativer Pinselspitze lässt sich das Gel leicht auf die Zähne applizieren. Über ein Touch-Display auf dem GLO-Regler wird das GLO Mundstück aktiviert. Während der Anwendung kann der GLO Regler um den Hals getragen werden, wodurch sich der Patient frei und uneingeschränkt bewegen kann. Der integrierte Timer schaltet die Lampe im Mundstück nach 8 Minuten automatisch ab und beugt so Überreaktionen vor. Nach der Behandlung lässt sich das Gel rückstandslos mit Wasser von den Zähnen abspülen. An 5-10 hintereinander folgenden Tagen müssen 3 Anwendungen á 8 Minuten durchgeführt werden.



Schritt 1:

Mundstück an den aufgeladenen GLO-Controller anschließen und GLO-Taste einmal drücken, um mit dem Aufwärmen des Mundstückes zu beginnen.



Schritt 2:

Lippenbalsam auf die Lippen auftragen.



Schritt 3:

Den Deckel von den G-Vial Whitening Ampulle entfernen und etwas Gel herausdrücken.



Schritt 4:

Bleachinggel mithilfe der Pinselspitze auf die Zähne applizieren.



Schritt 5:



GLO Mundstück in den Mund geben und durch Drücken der GLO Taste auf dem Regler aktivieren. Nach 8 Minuten schaltet sich der Regler automatisch ab.

PATIENTENGWINNUNG


glo
GLO Science™



Mit dem Praxisaufsteller, Roll-Up, Poster und Patientenflyern gibt es zahlreiche Möglichkeiten Patienten auf **GLO Science** aufmerksam zu machen und Ihnen Informationen über **GLO Science** bereitzustellen.

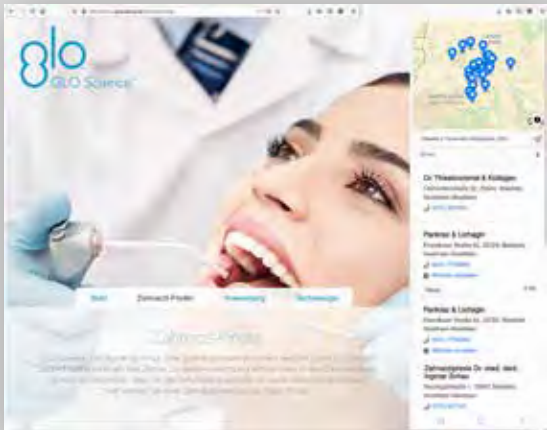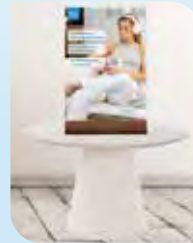

Der GLO Finder bringt Patient und Praxis zusammen. In dem GLO Finder können Interessenten eine Praxis in ihrer Nähe finden, die GLO anbietet.

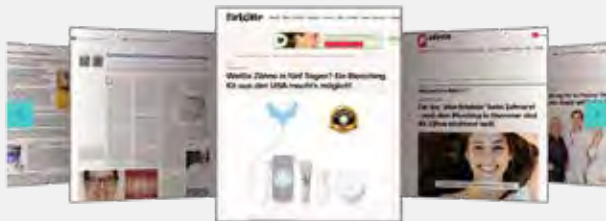

Erfahrungsberichte und Interviews von Zahnärzten
und Kieferorthopäden zum nachlesen.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKT 1



In-Office-Bleaching für schnelle Ergebnisse



- + **Schnelle Ergebnisse:** Strahlend weißes Lächeln in nur 60 Minuten durch modernes In-Office-Bleaching.
- + **Komplettpaket:** Von Gingivaschutz bis Desensitizer, das Natural+ Set beinhaltet alles was für eine effektive Zahnaufhellung benötigt.
- + **Optimierte Wirkung:** Verwendung von 33% Wasserstoffperoxid in Kombination mit der Natural+ LED Lampe fördert die Aufnahme von Mineralien und Fluoriden, wodurch Sensibilitäten reduziert werden.
- + **Entspannende Anwendung:** Während der 30-minütigen Einwirkzeit können Patienten Musik über Bluetooth-Kopfhörer hören.
- + **Zahnschonend:** Das Bleaching verläuft pH-neutral und enthält Mineralien aus dem Toten Meer zur Vorbeugung von Demineralisierung.
- + **Maximale Ergebnisse:** Bis zu 8 Farbstufen weißere Zähne sind möglich.



PRODUKT 2

Zahnaufhellende Auffrischung

- + **Langfristige Auffrischung:** Erhalt des strahlend weißen Lächelns bis zu 24 Monate nach dem In-Office-Bleaching.
- + **Einfache Anwendung:** Möglichkeit, alle 4 Wochen für bis zu 12 Monate von Zuhause aus aufzufrischen.
- + **Komplettes Kit:** Enthält Zahnbürste, Zahnpasta, 6%-iges Wasserstoffperoxidgel, ein Universal-Mundstück mit LED-Licht und Smartphone-Adapter.
- + **Flexibilität:** Ideal zur individuellen Anwendung, um das Bleaching-Ergebnis zu verlängern.

PRODUKT 3



Professionelle Zahnaufhellung für Zuhause

- + **Prämiertes Design:** Entwickelt von Top-Zahnärzten aus New York für eine sichere und professionelle Zahnaufhellung zu Hause.
- + **Vielseitige Anwendung:** Kann alleine oder nach einem In-Office-Bleaching zur Maximierung des Weiß-Effekts eingesetzt werden.
- + **Einfaches System:** Enthält alles Notwendige, um sofort mit der Zahnaufhellung zu beginnen.
- + **Schnelle Anwendung:** Einfache Schritte zur Anwendung: Lippenbalsam, Gel auftragen, Mundstück einsetzen und LED-Licht aktivieren, mit automatischer Abschaltung nach 8 Minuten.
- + **Nachhaltige Nutzung:** GLO Set kann mehrmals genutzt werden, mit Nachfüllpackungen für das Bleaching-gel in der Praxis erhältlich.

Zahnaufhellungsangebote für Ihre Patienten

Mit unseren hochwertigen Zahnaufhellungsprodukten können Sie Ihren Patienten verschiedene Optionen zur Zahnaufhellung anbieten. Die folgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die möglichen Angebote, die Sie Ihren Patienten zur Verfügung stellen können.

Die aufgeführten Preise sind Beispiele und dienen lediglich als Orientierungshilfe.



Angebot 1	Angebot 2	Angebot 3	Angebot 4
In-Office Bleaching mit Natural+	In-Office Bleaching mit Natural+	In-Office Bleaching mit Natural+	Home-Bleaching mit GLO Science Pro Home für 5-10 Tage.
350,- €	450,- €	550,- €	250,- €

Vertrieb Deutschland:



Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co.KG

Johanneswerkstraße 3
D-33611 Bielefeld

Fax: +49 (0) 521 - 801 68 01

Tel.: +49 (0) 521 - 801 68 00

E-Mail: info@bisico.de

Web: www.bisico.de

Follow us:

 [bisicobleaching](https://www.facebook.com/bisicobleaching)

 [@bisicobleaching](https://www.instagram.com/bisicobleaching)

 [bisico](https://www.youtube.com/bisico)