



Capsule vor der Aktivierung.

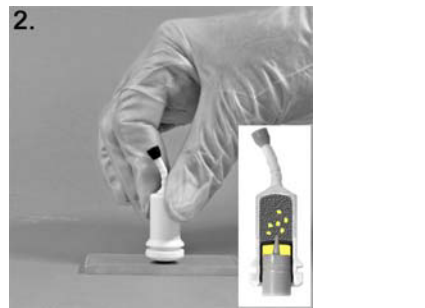

Zum Aktivieren der Capsule den Kolben auf einer Harten, ebenen Unterlage bis zum Anschlag in die Kapsel drücken.

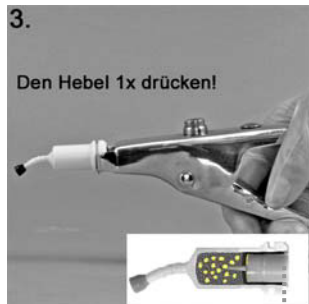


Die Kapsel in die DirectGun einsetzen und den Hebel des Applikationsgerätes **einmal** drücken.


Wichtig: Der Kolben muss bündig mit dem Kapselkörper abschließen.



Die Kapsel in einen handelsüblichen Mischer einsetzen, den Deckel schließen und sofort mischen (ca. 4300 Schwingungen/Min.). Mischzeit: siehe entsprechende Gebrauchsanweisungsempfehlung)

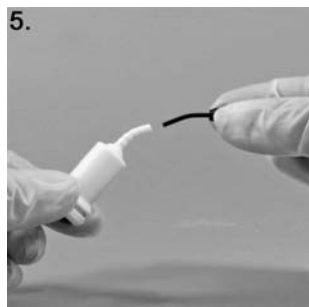

Den Pin entfernen. Sonst besteht Gefahr, dass die Kapsel platzt.

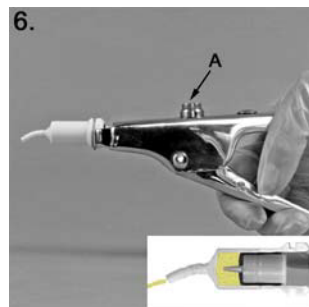


Die Kapsel in das Austraggerät einsetzen und den Hebel zur Vorbereitung der Kapsel 2 x durch-ziehen (2 x deutliches Klicken). Das angemischte Material direkt in die Präparation applizieren. Das Austraggerät entarretieren (Knopf A drücken) und die Kapsel entnehmen.


Nur bei Verwendung des Applikationsgerätes „DirectGun“ ist die optimale Austragsmenge garantiert.




65785-02.2019

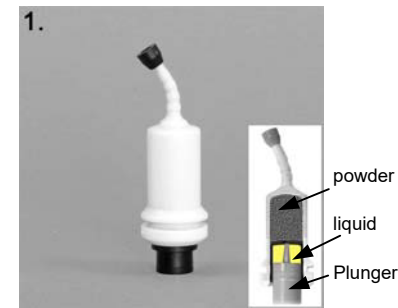

Capsule before activation.

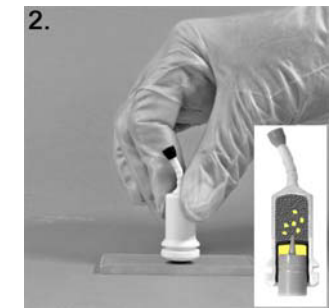

For activation of the Capsule press the plunger on a hard and plane surface to the end into the DirectCap.

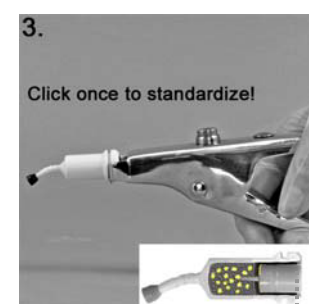


Insert the Capsule into the DirectGun and **click once** to standardize.


Note: The plunger must be at the same level as the bottom of the capsule.



Insert the Capsule into a mixer (or an amalgamator), close lid and mix immediately (about 4300 oscillations / min). Mixing time: see corresponding recommendation for use

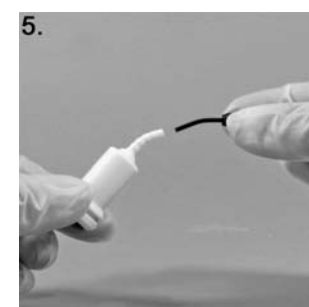

Remove the pin from the nozzle. If not, capsule can burst.

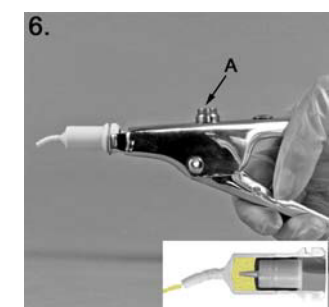

Insert the Capsule into the applicator tool. Pull the lever 2 times (2 clicks) to prime the Capsule. Extrude the mixed material directly into the preparation. Unlock the gun (push button A) and remove the DirectCap.

Only with the application tool "DirectGun" the optimal amount of mixed material is guaranteed.



0482