

Aufklärungsbogen Natural+ Home

Sehr geehrter Patient,

Ihr Bleaching Set ist für die Auffrischung des Bleaching-Ergebnisses nach einer Professionellen Zahnaufhellung mit NATURAL+ konzipiert. Die Auffrischung erfolgt alle 4 Wochen für ca. 12 Monate.

Das **Bleaching Gel (6% Wasserstoffperoxid) muss im Kühlschrank gelagert** werden.

Anwendung:

1. Zähne mit der beiliegenden Zahnbürste und der PowerPrep Zahnpasta putzen
2. Verbinden Sie das Universalmundstück mit Ihrem Mobiltelefon, ggf. unter Verwendung des entsprechenden Adapters
3. Füllen Sie das Zahnaufhellungsgel in das Mundstück, indem Sie auf den Spritzenkolben drücken. (Drehen Sie den Spritzenkolben des Bleachinggels gegen den Uhrzeigersinn, um den Dispenser zu entriegeln). 2 Tropfen sind ausreichend für jede Seite des Mundstückes. Verteilen Sie das Gel gleichmäßig mit der Spritze in dem Mundstück.
4. Mundstück einsetzen
5. Drücken Sie den Startknopf auf dem Kabel (Nach 60 Minuten geht das LED-Licht automatisch aus)
6. Lassen Sie das Mundstück mit dem Gel für 60-90 Minuten in dem Mund.
7. Entnehmen Sie das Mundstück und spülen Ihren Mund und das Mundstück mit Wasser aus
8. Tragen Sie den beruhigenden Balsam #5 auf die Zähne und das Zahnfleisch auf

Für das bestmögliche Behandlungsergebnis meiden Sie direkt nach der Behandlung:

- Kaffee und Tee
- Tabak
- Rotwein
- Braune und rote Soßen
- Spinat
- Curry
- Senf und Ketchup
- Cola
- Rote Beete

Achtung

Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch gründlich.

Bei Empfindlichkeiten im Mundraum oder allergischer Reaktionen brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab und konsolidieren Sie Ihren Zahnarzt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen strahlenden Lächeln.