

GLO PRO POWER



Fazit

„Auf jeden Fall würde ich das GLO PRO POWER in meiner Praxis einsetzen und auch empfehlen! Super Produkt.“

Vesna Braun, DH
Praxis & More ®



Klinischer Anwenderbericht – GLO PRO POWER

Frau Vesna Braun (Praxis & More, Appenweier) hat das neue GLO PRO POWER Bleaching-System über 5 Tage hinweg klinisch getestet – mit durchweg exzellenten Ergebnissen.

Als Ausgangsfarbe wurde B1 dokumentiert. Bereits nach der ersten Anwendung stellte Frau Braun eine leichte Steigerung der Strahlkraft fest, die sich in den darauffolgenden Tagen kontinuierlich verbesserte. Nach Tag 5 lag die Zahnfarbe deutlich oberhalb von B1.

Ihr erster Eindruck war durchweg positiv: Das System erhielt die Note 1 (sehr gut) – insbesondere Design, Handling und Verpackung überzeugten. Die Anwendung selbst bewertete sie ebenfalls mit Note 1 – sie empfand das System als intuitiv und einfach in der Handhabung. Besonders hebt sie hervor, dass keine Abdrücke nötig waren, kein Labor erforderlich war und der Start der Behandlung z. B. direkt nach einer PZR möglich ist.

Testerin: Vesna Braun, Praxis & More
Ausgangsfarbe: B1
Endergebnis: heller als B1
Testdauer: 5 Tage

Das finale Aufhellungsergebnis bewertete Frau Braun mit der Note 1 (sehr gut). Empfindlichkeiten oder Sensibilitäten traten während der gesamten Testphase nicht auf – ebenfalls bewertet mit Note 1 (gar keine Beschwerden).

Zu den größten Vorteilen zählt sie:

- keine Abdrücke,
- kein Laboraufwand,
- sofortiger Start ohne Wartezeit,
- sehr angenehm und einfach in der Anwendung.

Lediglich kleine Anmerkungen:

Das On/Off-Feld reagierte nicht immer beim ersten Tippen, und sie spürte während der Belichtung eine leichte Erwärmung, was jedoch als unproblematisch empfunden wurde.

Ihr abschließendes Fazit lautet:

„Auf jeden Fall würde ich das GLO PRO POWER in meiner Praxis einsetzen und auch empfehlen! Super Produkt.“



Professionelle Zahnaufhellung neu gedacht

Mit dem GLO PRO POWER bringt GLO Science eine echte Innovation in die Zahnaufhellung für Zuhause. Das kabellose Home-Bleaching-System kombiniert Licht, Wärme und ein geschlossenes System – für maximale Effizienz bei minimalem Aufwand.

Dank der G.L.O. Technologie (Guided Light Optics) dringt das enthaltene 6 % H₂O₂-Gel tief in die Zahnstruktur ein, ohne zu verlaufen oder das Zahnfleisch zu irritieren. Die Anwendung ist schnell (nur 2 x 8 Minuten täglich), komfortabel und vollständig schmerzfrei – ganz ohne Abdruck, ohne Schiene, ohne Labor.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 5 Farbstufen hellere Zähne
- Nur 16 Minuten tägliche Anwendungszeit
- Keine Sensibilitäten
- Veganes, tierversuchsfreies Bleachinggel
- Preisgekrönt als TOP Product 2024 (Dental Advisor)

