




Jetzt  
**kostenlosen**  
**Demo-Termin**  
für Ihre Praxis  
vereinbaren

Die schnelle und effektive  
Zahnaufhellung für Ihre Praxis!

**bisico**<sup>®</sup>

## Einzigartiges Design - Einzigartige Wirkung

NATURAL+ Professional ist ein innovatives, etabliertes System der Zahnaufhellung für die Behandlung aller Typen intrinsischer und extrinsischer Flecken und Verfärbungen. Das NATURAL+ Professional Gel basiert auf stabilisiertem 33%-igem  $H_2O_2$ . Bei den marktüblichen Zahnaufhellungssystemen, die auf Wasserstoffperoxid basieren, ist der Aufspaltungsprozess des  $H_2O_2$  abhängig von Temperatur, Stabilisatoren, Übergangsmetallen sowie Katalysatoren. Das patentierte **umweltfreundliche Natural+ Wasserstoffperoxid Gel** hat eine völlig andere Wirkungsweise.

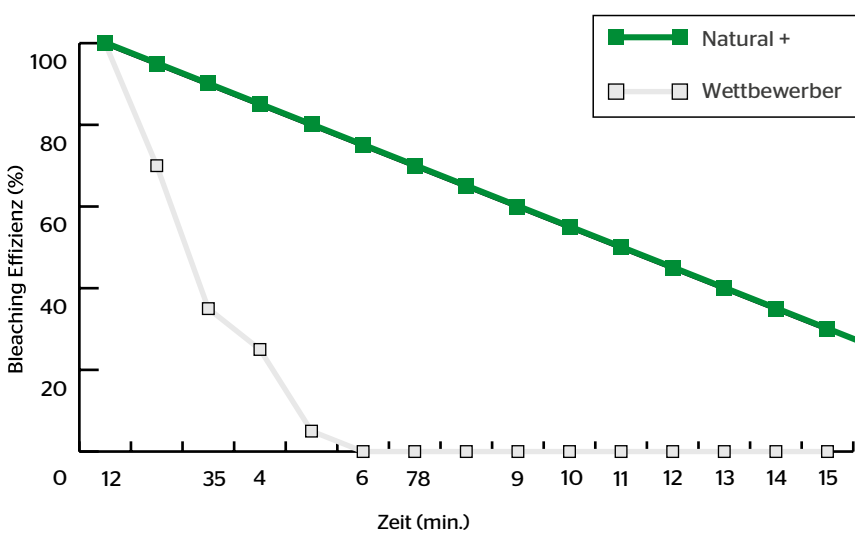

### Was macht Natural+ so einzigartig?


Das NATURAL+ Professional Gel basiert auf stabilisiertem 33%-igem  $H_2O_2$ . Der Prozess der Sauerstofffreisetzung ist während des Bleachingvorgangs progressiv und nicht volatil. Diese spezifische Eigenschaft macht es möglich, dass die Wirksamkeit des Wirkstoffes über einen Zeitraum von mind. 45 Minuten erhalten bleibt und somit ein erneutes Auftragen des Gels nicht erforderlich ist. Der Arbeitsaufwand wird deutlich minimiert, da der Bleachingvorgang in einem

Arbeitsschritt durchgeführt wird. Ein erneutes Auf- und Abtragen des Bleachinggels entfällt.

Die kontinuierliche, langsame Freisetzung der radikalischen Sauerstoffionen ermöglicht ein tiefes Eindringen der Sauerstoffionen in das Dentin.

Das NATURAL+ Bleachinggel ist mit **Kalium, Kalziumnitrat** und **Natriumfluorid** angereichert. Die stabilisierte Formel ermöglicht die Zugabe dieser Mineralien in einer hohen Konzentration ohne das Wasserstoffperoxid aufzulösen. Hypersensibilitäten werden minimiert.

Das NATURAL+ Bleachinggel ist **frei von Schwermetallen** und **100% ökologisch**. Schwermetalle verbinden sich mit den Mineralien auf der Zahnoberfläche und verursachen einen Wasserverlust durch Diffusion, was zur Austrocknung der Zähne führt. Eine optimale Hydratation der Zähne wird so während des gesamten Bleachingprozesses gewährleistet.

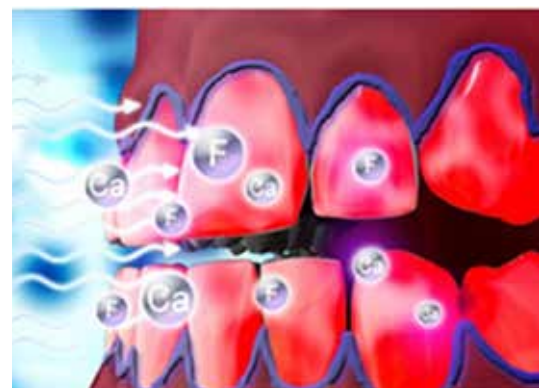

**NATURAL+ in der Praxis**

Anwendungsberichte von Zahnärzten für Zahnärzte



## Sechs Komponenten - Ein perfektes Ergebnis

Das NATURAL+ Professional Set beinhaltet alle Komponenten, die für eine erfolgreiche und reibungslose Behandlung nötig sind:

### PowerPrep+

Das PowerPrep+ Gel ist ein Vorbereitungs- und Reinigungsgel zur Entfernung des Biofilms. Das PowerPrep+ Gel konditioniert den Zahnschmelz für den Aufhellungsprozess.

### Gingiva Protector

Der Gingiva Protector ist ein Schutzgel für die Gingiva zur Minimierung von Sensibilitäten am Zahnfleisch. Der Gingivaschutz deckt Schleimhäute, Putzdefekte und freiliegende Zahnhäse ab. Durch die hohe Viskosität lässt sich der Gingiva Protector hervorragend nacharbeiten, ohne zu verlaufen.

### Natural+ Aktivator

Das Aktivierungsgel wird mit dem Aufhellungsgel vermischt. Dieses ist angereichert mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid.

### Natural+ Aufhellungsgel mit 33% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Das NATURAL+ Aufhellungsgel wird einmalig auf die Zähne aufgetragen und wirkt für 30-45 Minuten ein. Der pH-Wert bleibt neutral und verringert eine übermäßige Dehydratation der Zähne.

### Polierpaste

Die Polierpaste ist eine spezielle Prophylaxepaste zur Fluoridierung der Zähne nach dem Bleaching. Die Polierpaste ist mit amorphem Calciumphosphat und mit Mineralien aus dem Toten Meer (Natriumfluorid 3,6%) angereichert.

### Pflegebalsam

Pflegender und schmerzlindernder Balsam bei Empfindlichkeiten am Zahnfleisch.



## PH neutraler Bleachingprozess mit natürlichen Zutaten

Dank der speziellen patentierten Formel erfolgt die Zahnaufhellung ökologisch, nicht toxisch und nahezu schmerzfrei. Durch die Vermischung des Aktivators (pH Wert von 14) und des Bleachinggels (pH Wert von 3) erfolgt der Aufhellungsprozess pH neutral.

Das Natural+ Bleachinggel ist mit Kalium, Kalziumnitrat und Natriumfluorid angereichert, wodurch eine optimale Mineralisierung der Zähne während des gesamten Bleachingprozesses gewährleistet ist.

### Kalzium

- + Schützt vor Demineralisierung
- + Puffer für den Säuregehalt
- + Neutralisiert

### Kaliumnitrat

- + Beruhigt die Zahnnerven
- + Puffer für den Säuregehalt

### Natriumfluorid

- + Stärkt den Zahnschmelz
- + Hat kariostatische Wirkung:  
Die Säurelöslichkeit der Zahnhartsubstanz wird vermindert und die Remineralisation gefördert.

## Bis zu 8 Farbstufen weißere Zähne in 30 Minuten



## Komfortables Design - Sichere Anwendung

Die NATURAL+ Lampe ist eine revolutionäre Zahnaufhellungslampe mit Hochleistungs-LED-Technologie, die sich durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Lichtspektren, aus rotem und blauem Licht, auszeichnet.

Die Wellenlänge, Bestrahlungsstärke und Behandlungsdauer sind auf den Einsatz mit dem Natural+ Zahnaufhellungsgel optimal abgestimmt.

Die LED-Lampe wird mit optimalem Abstand zu den Zähnen, an eine Vorrichtung der Kopfhörer befestigt. Die Kopfhörer zeichnen sich durch ein ergonomisches Design und einen hohen Tragekomfort aus. Via Bluetooth lassen sich externe Quellen (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) mit den Lautsprechern des Kopfhörers koppeln, sodass während der Behandlung entspannt Musik gehört werden kann.

Die Steuerungseinheit überzeugt durch eine intuitive Bedienung. 4 Programme mit unterschiedlichen Intensitätsstufen stehen dem Anwender zur Verfügung. Die Auswahl der Stufe ist abhängig vom Zustand der Zähne und der Empfindlichkeit des Patienten. Zudem kann über ein Programm der Gingivaschutz ausgehärtet werden. Die Steuerungseinheit kann auch über die beiliegende Fernbedienung bedient werden.

In der Natural+ LED Lampe sind sowohl blaue als auch rote LEDs integriert. Die maximale Temperatur beträgt 34 Grad. Die blauen LED's mit einer Wellenlänge von 470 Nanometer wirken als Katalysator für das Natural+ Bleachinggel und verbessern die Wirksamkeit auf der Oberfläche bei tiefergehenden Verfärbungen. Die Intensität des blauen Lichts ist außerdem stark genug, um den Gingiva-Protector auszuhärten. Die roten LEDs haben eine Wellenlänge von 660 Nanometer. Dies sorgt dafür, dass das Zahnfleisch geschützt und Zahnfleischsensibilitäten reduziert werden. Zusätzlich ist bekannt, dass das Licht mit dieser Wellenlänge, die Aufnahme von Mineralien wie Kalzium und Fluoriden in das Enamel fördert.

Intuitive  
Steuerungseinheit mit  
4 Aufhellungsprogrammen

Hochleistung LED's mit  
zwei Lichtspektren

**Behandlungsvideo**  
Schritt-für-Schritt Anleitung



## Optimierte Aufhellungsergebnisse nach einer In-Office Behandlung

Das NATURAL+ HOME Kit ist die perfekte Ergänzung zum NATURAL+ Professional In-Office-Bleaching.

Mit dem NATURAL+ Home Kit können Ihre Patienten das strahlend weiße Lächeln nach einem In-Office-Bleaching bis zu einem Jahr von Zuhause aufrecht erhalten. Das Bleachingergebnis des NATURAL+ In-Office-Bleaching wird mit dem NATURAL+ HOME Kit einmal im Monat aufgefrischt.

Das Home-Kit enthält eine Zahnbürste, eine Power-Prep Zahnpasta, 6%-iges NATURAL+ Wasserstoffperoxidgel, ein Mundstück mit LED-Licht sowie Adapter für Smartphones.

Das Mundstück ist in Universalgröße gefertigt und umfasst die oberen und unteren Zähne gleichzeitig. Angeschlossen wird das Mundstück an das Smartphone des Patienten. Die Behandlungsdauer wird dank des hoch intensiven LED-Lichts verkürzt. Im Mundstück ist ein Timer von 60 Minuten eingebaut. Dieser wird automatisch, durch drücken der Starttaste auf dem Kabel, aktiviert. Das Gel sollte 60 - max. 90 Minuten auf den Zähnen bleiben. Wiederholt wird der Auffrischungsvorgang alle 4 Wochen.

Natural+ Home ist nur in Verbindung mit Natural+ Professional erhältlich.



## Easy Light

### Mobile Dental Photography

Das Easy Light verbessert die Qualität von Smartphone Aufnahmen und kann hervorragend für die Dokumentation von Bleaching-Ergebnissen verwendet werden.

Die Bedienung ist sehr einfach, es werden keine spezielle App, kein Kalibrierungsprozess und keine besondere Ausbildung benötigt.

Der Universaladapter ist passend für jedes Smartphone.





## KONTAKT & FRAGEN

Wenn Sie etwas über Zahnaufhellung allgemein, oder über unsere Produkte erfahren möchten, fragen Sie uns einfach.

Wir sind gerne für Sie da.



### **Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.KG**

Johanneswerkstraße 3

33611 Bielefeld

Tel.: +49 521 801 68 00

Fax: +49 521 801 68 01

E-Mail: [info@bisico.de](mailto:info@bisico.de)

Web: [www.bisico.de](http://www.bisico.de)